

Producent i Dystrybutor
Środków Ochrony Pracy

UNIFORM

Uniform Sp. z o. o.
ul. Redutowa 25
01-106 Warszawa

tel.: +48 (22) 836 94 54 (-55)
faks +48 (22) 213 89 50
e-mail: bhp@uniform.pl

Plan pierwszej pomocy przy urazach oczu

Plum Eye Wash

Zagrożenie	Płukanie wstępne	Kontynuacja płukania	Wskazówki
Ciała obce: kurz, brud, opiłki metalu, odpryski drewna itp.	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Płucz oko płynem Eye Wash dopóki obce ciało nie zostanie wypłukane. W miarę potrzeby skorzystaj z pomocy lekarskiej.
Kwasy	pH Neutral	Plum Eye Wash	Płucz oko płynem pH Neutral przez ok. 2 min., kontynuuj płukanie stosując Plum Eye Wash aż do momentu poprawy lub do chwili uzyskania pomocy lekarskiej.
Alkalia (zasady)	pH Neutral	Plum Eye Wash	Płucz oko płynem pH Neutral przez ok. 2 min., kontynuuj stosując Eye Wash do chwili uzyskania pomocy lekarskiej.
Pozostałe substancje chemiczne	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Płucz oko do momentu poprawy lub do chwili uzyskania pomocy lekarskiej.
	pH Neutral		
Substancje chemiczne na skórze	pH Neutral	Plum Eye Wash	Płucz skórę płynem pH Neutral, a następnie kontynuuj przepłukiwanie stosując Eye Wash do momentu poprawy lub do chwili uzyskania pomocy lekarskiej.